




Kortmanual

Gäller för modell: Vakuklav 40,41,43,44

Funktioner

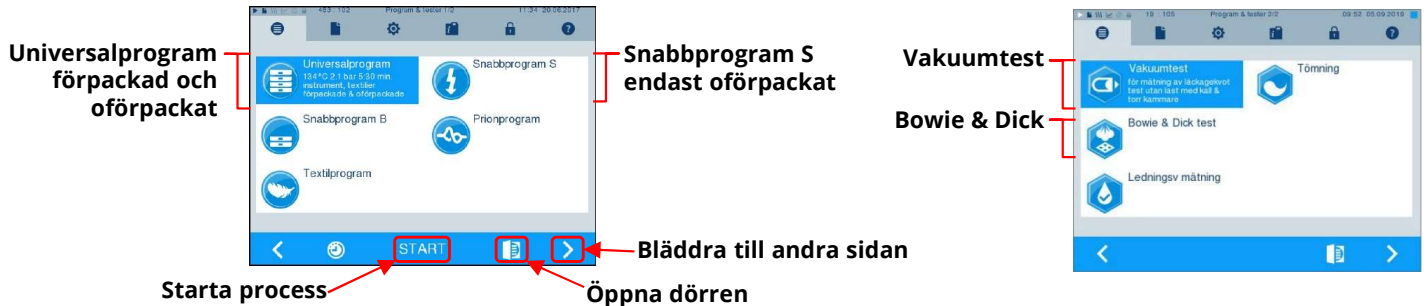

Process

**Programmet är klart
Process godkänd**



**Programmet är avbrutet
Process EJ godkänd**

Typiska larm och återställning



Larm 72. Processvattnet har dålig kvalitet.

Skanna QR-koden för se hur man bytte av filterpatroner



Larm 175 eller 176. Huvudvärmarens överhettningsskydd är utlöst.
1. Stäng av autoklaven och tryck in återställningsknappen
2. Kvittera störningsmeddelandet.
3. Stäng av autoklaven och sätt på den igen.

Larm 179. Motorskyddsbrytaren till vakuumpumpen har löst ut.
1. Tryck in återställningsknappen till motorskyddsbrytare
2. Kvittera störningsmeddelandet.
3. Stäng av autoklaven och sätt på den igen.

Rutindriften

- En gång per arbetsdag. Ängpenetrationstestet med MELAcontrol eller Bowie & Dick Test
- En gång i veckan före drift. Vakuumtest. Autoklaven måste vara kall och torr
- En gång i månad. Backup av CF kort
- Varannan månad. Droppa två droppar olja i den gängade bussningen i dörrlåset.

Behöver du hjälp?

Skanna QR Koden



**Snabbhjälp
Felanmälan
Service
Validering**

Kemikalier



Ultraljudsbad



Svetsar



Diskdesinfektor

